

# boso medicus family 4.

Das Partner- und Familien-Blutdruckmessgerät.



Arrhythmie-Erkennung zeigt Herzrhythmusstörungen und deren Häufigkeit an

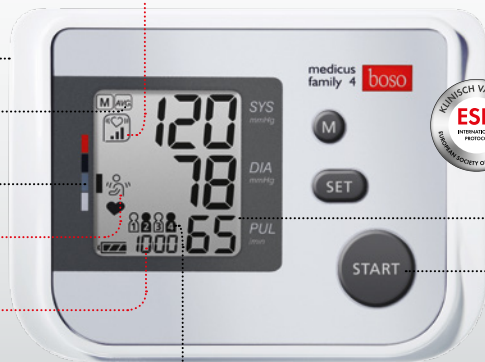
Mit Universalmanschette für Armumfang von 22 bis 42 cm

Mittelwertanzeige

Blutdruck-Bewertungsskala nach WHO

Bewegungssensor verhindert falsche Messergebnisse

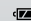

Anzeige von Datum und Uhrzeit der gespeicherten Werte



Großes Display mit 3-Werte-Anzeige

Vollautomatische Messung am Oberarm – intelligente Messung ohne Nachpumpen

4 Speicher für jeweils 60 Messwerte – Gastmodus für weitere Benutzer, deren Werte nicht gespeichert werden sollen

 Statusanzeige für Batterien; Netzgerät optional  
 Messung läuft

**KS** Medizintechnik  
SEIT 1921

Karthäuser Straße 21  
34587 Felsberg  
Kostenlose Servicehotline  
Tel.: 0800 - 10 10 871

www.ksmedizintechnik.de  
info@ksmedizintechnik.de

[Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->](#)

Premium-Qualität für die Gesundheit

**boso**  
BOSCH + SOHN  
GERMANY

# Einfach programmieren und nutzen: boso medicus family 4



- M-Taste
- Wählen oder bestätigen: SET-Taste
- Änderung des jeweiligen Parameters durch Betätigung der START-Taste

1. Einstellung aktuelles Jahr	Drücken Sie die SET-Taste ca. 2 Sek., ändern Sie die Jahreszahl durch Drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste.
2. Einstellung aktueller Monat	Ändern Sie den Monat durch drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste.
3. Einstellung aktueller Tag	Ändern Sie den Tag durch drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste.
4. Einstellung aktuelle Stunde	Ändern Sie die Stunde durch drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste.
5. Einstellung aktuelle Minute	Ändern Sie die Minute durch drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste.
6. Einstellung 12h- oder 24h-Anzeige	Grundeinstellung 24h   Ändern Sie wenn gewünscht den Uhrzeitmodus von 24h auf 12h oder OFF (hier wird keine Uhrzeit angezeigt) durch Drücken der START-Taste und bestätigen Sie die Eingabe über die SET-Taste. (z.B. 12h = 5:32 Uhr Nachmittag oder 24h = 17:32 Uhr Nachmittag).
7. Einstellen des Benutzers	Drücken Sie kurz die SET-Taste. Wählen Sie ggf. durch mehrfaches Drücken der SET-Taste den gewünschten Benutzer (1 bis 4) aus und bestätigen Sie die Eingabe über die START-Taste.
8. Abruf der Messwerte	Drücken Sie die M-Taste zum Abruf des Mittelwertes aus den letzten max. 60 Messwerten. Zum Abruf aller einzelnen Messwerte inkl. Datum und Uhrzeit drücken Sie die M-Taste mehrfach. Zum Wechseln der Benutzer (1 bis 4) drücken Sie die SET-Taste.
9. Nutzung Gastmodus	Eine Messung wird nicht gespeichert (=Gastmodus) durch drücken der M-Taste unmittelbar nach der Messung, solange die Werte noch angezeigt werden.
Menü verlassen/Beenden der Einstellungen	Drücken Sie die SET-Taste so oft bis keine Displayanzeige mehr zu sehen ist oder bis Sie wieder beim gewünschten Einstellparameter sind.
Speicher/Benutzer verlassen	Drücken Sie die START-Taste.