

INSTRUMENTE / MANUELLE AUFBEREITUNG

PERFEKTAN® TB



Aldehydfreies Konzentrat
zur Instrumentenreinigung
und Instrumentendesinfektion



VAH

IHO

PREVENT

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Aldehydfreies Präparat mit guter Reinigungskraft
- Materialschonend
- Angenehmer Geruch

PERFEKTAN TB ist ein besonders wirtschaftliches, materialschonendes, reinigungsaktives Instrumentendesinfektionsmittel für die tägliche Anwendung in der Praxis. Durch die hervorragende antimikrobielle Wirksamkeit wird ein hohes Maß an Personalschutz während der Instrumentenaufbereitung gewährleistet. **PERFEKTAN TB** zeichnet sich aufgrund der aldehydfreien Formulierung durch einen angenehmen Geruch aus und ist geeignet für die Anwendung an medizinischen Instrumenten.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete

Zur desinfizierenden, nicht fixierenden Reinigung und zur Desinfektion von Instrumenten und Dentalinstrumenten. Zum Einsatz im Ultraschallbad geeignet. Nicht geeignet für die Aufbereitung von Larynxmasken.

Anwendung

Die **PERFEKTAN TB** Gebrauchslösung in der gewünschten Konzentration mit Wasser (max. 40 °C) ansetzen. Gebrauchslösung durch Verdünnung mit geeignetem Wasser gemäß nationaler Richtlinien herstellen.

Desinfizierende Reinigung im Tauchbadverfahren: Instrumente, ggf. nach vorheriger Grobreinigung, in die Gebrauchslösung einlegen und wo erforderlich mechanisch reinigen. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Instrumente gründlich mit Wasser abspülen und weiter aufbereiten. Zur Anwendung im Ultraschallbad geeignet.

Desinfektion im Tauchbadverfahren: Instrumente nach vorheriger Reinigung in die Gebrauchslösung einlegen. Sämtliche Flächen und Hohlräume müssen von der Gebrauchslösung vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Instrumente gründlich mit geeignetem Wasser abspülen, trocknen und weiter aufbereiten.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Bei Reinigung im Ultraschallbad: Die Beschallungszeit gemäß der Herstellerangabe sowie Temperaturen von 40 °C nicht überschreiten.

Nicht zur Schlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten geeignet. Die Gebrauchslösung bei sichtbarer Verschmutzung, spätestens jedoch arbeitstäglich wechseln.

KS Medizintechnik

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

Zur Schlussdesinfektion Medizinprodukte ab der Risikoklasse semikritisch A mit einem viruzid wirksamen Desinfektionsmittel, zum Beispiel mit **PERFEKTAN ACTIVE** aufbereiten. Ultraschallbadverfahren: **PERFEKTAN TB** kann zur Erhöhung der Reinigungsleistung in allen Ultraschallbädern aus Edelstahl verwendet werden. Die zur Reinigung verwendete, frisch angesetzte **PERFEKTAN TB** Gebrauchslösung muss vor der ersten Verwendung entgast werden. Temperaturen über 40 °C in der Gebrauchslösung sind zu vermeiden, da diese zu Inkrustierungen führen können. Nach Ablauf der Einwirkzeit die Medizinprodukte gründlich mit VE-Wasser (vollentsalztem Wasser) abspülen.

Im Umgang mit **PERFEKTAN TB** ist geeignete Schutzausrüstung (PSA) zu tragen. Weiterführende Informationen unter www.bgw-online.de. Instrumente und Wannen vor Erstbenutzung von **PERFEKTAN TB** gründlich reinigen, um Chemikalienrückstände zu entfernen. Instrumentenwannen sind mindestens arbeitstäglich zu reinigen und zu desinfizieren, bevorzugt mit einem alkoholisch getränkten Einmal-Tuch, zum Beispiel **DESCOCEPT PUR WIPES RTU**.

Zusammensetzung

100 g enthalten: 5,6 g N, N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniumpropionat; 3,75 g Cocospropyldiamin-1,5-bis-guanidinium-diacetat. Enthält Duftstoffe: Limonene; 5 - 15 % nichtionische Tenside, Desinfektionsmittel.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Messing, Aluminium, Polystyrol (PS), Polysulfon (PSU), Polyethylenterephthalat (PET), Polymethylmethacrylat (PMMA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC). Die Anwendung ist bei folgenden Materialien nur bedingt zu empfehlen: Kupfer, Edelstahl V2A.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

PERFEKTAN® TB



PREVENT

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

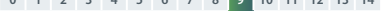
WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			5 min	15 min	30 min	60 min
Anwendungsempfehlung zur Instrumentendesinfektion						
Bakterizid ¹ , levurozid ¹	EN 14561	hohe Belastung		3 %	2 %	1 %
	EN 14562	hohe Belastung		3 %	2 %	1 %
Begrenzt viruzid	EN 14476	hohe Belastung		3 %		
	EN 17111	hohe Belastung		3 %		
Ergänzende Prüfergebnisse						
bakterizid ¹ , levurozid ¹	VAH/EN ²	hohe Belastung			2 %	1 %
bakterizid	EN 13727	hohe Belastung	1,5 %	1 %		
	EN 14561	hohe Belastung		3 %	2 %	1 %
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	hohe Belastung		1 %	0,5 %	
	EN 14562	hohe Belastung		2 %	1 %	
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige Belastung		1 %		
	EN 14476	hohe Belastung		3 %		
	EN 17111	hohe Belastung		1 %		
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung				5 %
Anwendungsempfehlung zur desinfizierenden Reinigung im Ultraschallbad						
bakterizid, levurozid	DGHM/VAH	hohe Belastung		1 %		

1 – einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

2 – EN 13624, EN 13727, EN 14561, EN 14562, VAH M 8, VAH M 15

GEBINDE

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
PERFEKTAN TB	Dosierflasche	10	1 L	00-122-010-01	01833877
	Flasche	6	2 L	00-122-020-02	16202349
	Kanister	3	5 L	00-122-050-01	01810474

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   0482

ZERTIFIZIERUNGEN



Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.