




neodisher® DuoClean



Hochalkalisches Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung von thermostabilen Instrumenten

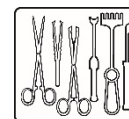

Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Maschinelle Intensivreinigung von medizintechnischen Utensilien wie z.B. Instrumente der Chirurgie, Gynäkologie, Orthopädie und der Hochfrequenzchirurgie

Leistungsspektrum:

- Hochalkalisches, tensidhaltiger Intensivreiniger mit hohem Reinigungsvermögen gegenüber Blut, Eiweiß und hartnäckigen OP-Rückständen
- Stark verschmutzte Instrumente der Gynäkologie, Orthopädie und der Hochfrequenzchirurgie werden im zweistufigen neodisher DuoClean-Prozess aufbereitet, ohne dass eine zeitaufwendige Vor- oder Nachbehandlung erforderlich ist
- Geeignet für medizintechnische Instrumente aus Edelstahl und anderen alkalibeständigen Utensilien aus Glas und Kunststoff
- Nicht geeignet für die Reinigung von Utensilien aus Aluminium und Eloxal
- Bei Titan und Titanlegierungen kann es zu Farbveränderungen kommen. Dies ist bei z.B. Implantaten mit Farbcodierung zu berücksichtigen
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar

Besondere Eigenschaften:

- Selbst nach langen Antrocknungszeiten werden Anschmutzungen sicher entfernt
- Enthält keine Phosphate, Silikate und Oxidationsmittel

Anwendung und Dosierung:

neodisher DuoClean wird in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten eingesetzt.

Die Dosiermenge ist u.a. vom Verschmutzungsgrad des Spülgutes abhängig und beträgt 3 - 5 ml/l.

Typische Programmläufe sehen folgendermaßen aus (Beispiele):

Zur maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten:

Vorreinigung	Mit Kaltwasser
Reinigungsschritt	3 - 5 ml/l neodisher DuoClean, z.B. 60 °C, 10 min
Erste Zwischenspülung	
Zweite Zwischenspülung	
Nachspülung und Thermodesinfektion	

Zur maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten im zweistufigen neodisher DuoClean-Prozess:

Vorreinigung	Mit Kaltwasser
Erster Reinigungsschritt	3 ml/l, neodisher DuoClean, 5 min, 55 °C
Zweiter Reinigungsschritt	5 ml/l, neodisher DuoClean, 5 min, 60 °C
Erste Zwischenspülung	
Zweite Zwischenspülung	
Nachspülung und Thermodesinfektion	

Die neodisher DuoClean-Anwendungslösungen sind vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen. Zur Vermeidung von Wasserflecken ist die Verwendung von vollentsalztem Wasser in der Schlusspülung zu empfehlen.



neodisher® DuoClean

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.

Technische Daten:

Dichte	ca. 1,2 g/cm ³ (20 °C)
pH-Bereich	12,2 – 12,4 (3 – 5 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 50 mPas (20 °C)
Titrierfaktor	0,55 (nach neodisher Titrieranleitung)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:
< 5 % amphotere Tenside
5 - 15 % Polycarboxylate

CE-Kennzeichnung:

neodisher DuoClean erfüllt die Vorgaben resultierend aus der europäischen Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur zwischen 0 und 30 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

MB 4030/3-2
Stand 03/2020