



INSTRUMENTENREINIGUNG UND DESINFEKTION

Anios'Clean Excel D

DESINFIZIERENDER REINIGER FÜR MEDIZINPRODUKTE

- Patentiertes Wirkstoffkonzept
- Synergistische Wirkstoffkombination aus QAV und Chlorhexidindigluconat
- Nicht korrosiv, kompatibel mit einer Vielzahl von Materialien
- Geeignet für den Einsatz im Ultraschallbad
- Kompatibel mit daVinci® Surgical System-Instrumente




Anios'Clean Excel D

Desinfizierender Reiniger für Medizinprodukte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Klare, blaue Lösung
- pH-Wert des Konzentrates: min 6,5 - max 7,5
- pH-Wert bei 0,5% in Leitungswasser: 7,4
- pH-Wert bei 0,5% in weichem Wasser: 7,6
- pH-Wert bei 0,5% in demineralisiertem Wasser: 6,6


DOSIERTABELLE

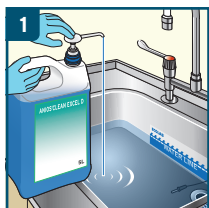


1. Konzentrierte Lösung. Entlüften Sie ggf. eine dazugehörige Pumpe vor dem ersten Gebrauch. Zum Einweichen die erforderliche Verdünnung unter Einhaltung der Mindestkontaktzeit von 5 Minuten verwenden.



2. Tauchen Sie das Medizinprodukt vollständig ein. Halten Sie das Einweichbad während der Kontaktzeit bedeckt. Bei sichtbaren Verunreinigungen bürsten oder anderweitig, mechanisch reinigen.

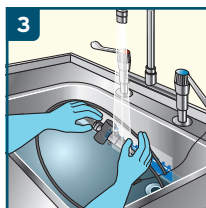

3. Die behandelten Medizinprodukte gut mit Wasser abspülen, um jegliche Produktrückstände und organischen Verunreinigen zu entfernen.

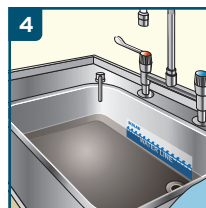

4. Die Lösung erneuern, wenn sie sichtbar verunreinigt ist, oder mindestens einmal täglich, um die anhaltende Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten.

MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	KONTAKTZEIT
Bakterizid* gemäß EN 13727/EN 14561	0,5%	5 min
Levurozid* gemäß EN 13624/EN 14562	0,5%	15 min
Tuberkulozid* gemäß EN 14348/EN 14563	2,0%	60 min
Begrenzt Viruzid gemäß EN 14476/EN 17111	0,5%	15 min
Wirksam gegen Polyomavirus SV40* gemäß EN 14476/EN 17111	2%	60 min
Gemäß VAH (bakterizid*, levurozid*)	1,5%	15 min

*= hohe Belastung

VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Anios'Clean Excel D	12 x 1 L Flaschen	3119700 PZN 192 753 66
Anios'Clean Excel D	2 x 5 L	3119740 PZN 192 753 72



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Vertrieb durch:
ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ANWENDUNGSBEREICH

Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten, wie z.B.: chirurgische und medizinische Instrumente, thermolabile Materialien wie z.B. Endoskope vor der Sterilisation.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Konzentrierte Lösung. Entlüften Sie ggf. eine dazugehörige Pumpe vor dem ersten Gebrauch. Zum Einweichen die erforderliche Verdünnung unter Einhaltung der Mindestkontaktzeit von 5 Minuten verwenden.
2. Tauchen Sie das Medizinprodukt vollständig ein. Halten Sie das Einweichbad während der Kontaktzeit bedeckt. Bei sichtbaren Verunreinigungen bürsten oder anderweitig, mechanisch reinigen.
3. Die behandelten Medizinprodukte gut mit Wasser abspülen, um jegliche Produktrückstände und organischen Verunreinigen zu entfernen.
4. Die Lösung erneuern, wenn sie sichtbar verunreinigt ist, oder mindestens einmal täglich, um die anhaltende Wirksamkeit des Produkts zu gewährleisten.

INHALTSSTOFFE

Didecylidimethylammoniumchlorid, Chlorhexidindigluconat, nichtionische Tenside, Duftstoff, Farbstoff, Hilfsstoffe.

LAGERUNG

Gefahrgut - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch (erstellt gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung chemischer Produkte) Lagerung zwischen + 5°C und + 25°C.

GUTACHTEN

Medizinprodukt. Die vollständige antimikrobielle Wirksamkeit von Anios'Clean Excel D ist im wissenschaftlichen Dossier enthalten. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachten zur Verfügung.

MEDIZINPRODUKTE SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie die Hinweise und Informationen auf dem Etikett und dem Produktdatenblatt.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



www.ecolab.com