



# Verwendung des DiaSpect Tm



## Probenahme



1 Punktionsstelle desinfizieren und trocknen



2 Fingerkuppe nahe der Seite lanzettieren



3 Die ersten 3 Blutropfen abwischen, dann die Küvette unterbrechungsfrei füllen



4 Die Außenseite der Küvette abwischen. Prüfen Sie, ob die Küvette vollständig befüllt ist.

## Messung



1 Die befüllte Küvette einsetzen, sanft herunterdrücken und halten



2 Der Hämoglobinwert wird umgehend auf dem Display angezeigt



3 Die Küvette sofort entnehmen. Notieren Sie den Wert, sobald das Häkchen erscheint



4 Der Wert wird bis zur nächsten Messung oder bis zum Drücken des Küvettenhalters angezeigt

## Reinigung

Verwenden Sie handelsübliche lösungsmittelfreie oder alkoholbasierte Desinfektionsmittel wie z. B. 70% Isopropylalkohol. Keine Sprühdeseinfektion!



1 Ziehen Sie den Küvettenhalter leicht zu sich und dann nach oben



2 Den Küvettenhalter mit kaltem Wasser oder mildem Reinigungsmittel reinigen, dann desinfizieren



3 Den trockenen Küvettenhalter wieder einsetzen und nach unten drücken, bis er einrastet



4 Reinigen Sie das Gerät mit kaltem Wasser oder mildem Reinigungsmittel, dann desinfizieren