


VISIOLITE® 4K Kurzanleitung



1.
Die Kartonage, der Schaumstoff-Einsatz sowie der Schaumstoff-Deckel und die Schaumstoff-Halterung für das Visiolite sollten vollständig wie auf Bild Nr. 1 vorhanden sein.

2.
Das Visiolite nun vorsichtig aus der Kartonage nehmen.

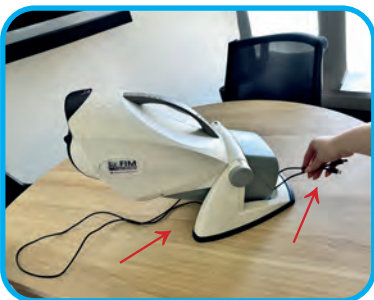

3.
Kippen Sie das Gerät ein wenig nach oben und ziehen Sie das Netzkabel und das USB-Kabel unter dem Visiolite her.

4.
Stecken Sie das Netzkabel und das USB-Kabel in die Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes.




5.
Kippen Sie nun das Visiolite nach oben

6.
Verbinden Sie das Gerät mit dem PC. Betätigen Sie den Schalter auf der Rückseite, um das Gerät einzuschalten.



VISIOLITE® 4K Kurzanleitung

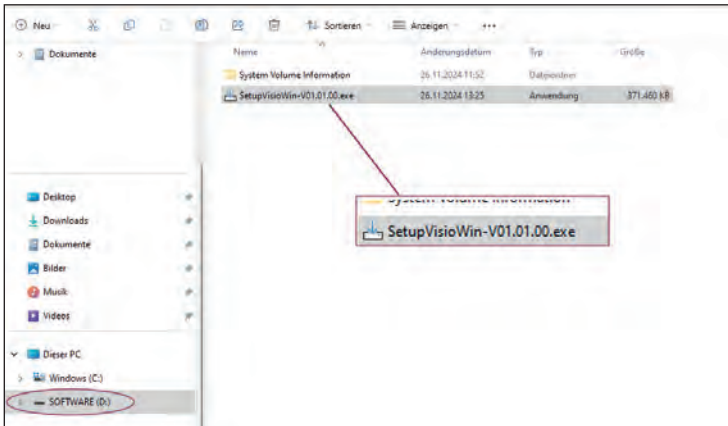

7. Installieren Sie nun vom beiliegenden USB Stick die VisioWin Software Version 1.4.0. und starten Sie **im Anschluss** die VisioWin Config Importer.exe.



8. Sie werden aufgefordert, den Lizenzschlüssel einzugeben.

Diesen finden Sie auf der Rückseite der beiliegenden Anleitung „Visiolite 4K“.

9. Die Installation ist nun abgeschlossen. Sie können sich einloggen.

Geben Sie als User-ID „**User**“ und als Passwort „**user**“ ein.

10. Um die User ID und das Passwort zu ändern, klicken Sie auf „Einstellungen“ → „Anwender“ → „Neu“ und legen Sie Ihr eigenes Anwenderprofil an.

Artikel Nummer: