

Parfümfreie Tücher zur Flächen-Schnelldesinfektion

VENTISEPT WIPES RTU PUR

- ✓ rückstandsfreie Abtrocknung
- ✓ Umfassende, schnelle Wirksamkeit, begrenzt viruzid PLUS
- ✓ VAH gelistet

Ventisept wipes RTU pur sind gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektions-Tücher zur Desinfektion von alkoholbeständigem medizinischem Inventar und Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Ventisept wipes RTU pur trocknen aufgrund ihrer parfüm- und farbstofffreien Eigenschaften rückstandsfrei ab und sind daher ideal für den Lebensmittelbereich geeignet.

Anwendungsgebiete:

Gem. EU-Medizinprodukte-Verordnung:
Schnelldesinfektion und Reinigung von nichtinvasiven, alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR):
Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigem, medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

Anwendung:

Flächen mit ventisept wipes RTU pur bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.

ventisept wipes RTU pur sind vorgesehen für die Verwendung mit wieder befüllbaren Tuchspendersystemen wie z. B. ventiwipes.

Angaben zur Befüllung und Aufbereitung der Tuchspendersysteme sind zu beachten. Nach jeder Tuchentnahme ist das Tuchspendersystem unmittelbar wieder zu verschließen.

Hinweis: Für alle alkoholbeständigen Flächen geeignet.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Haltbarkeit nach Anbruch:

28 Tage

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Materialverträglichkeit:

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyethylenterephthalat (PET).

ACHTUNG:

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelasenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. Nur zur professionellen Anwendung durch Personal mit entsprechender Sachkunde gemäß nationaler Richtlinien.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

Bakterizid, levurozid gem. VAH/EN 16615.....	5 Min.
Tuberkulozid (M.terrae) gem. EN 14348.....	30 Sek.
Mykobakterizid (M. avium und M. terrae) gem. EN 14348.....	1 Min.
Begrenzt viruzid gem. EN 14476.....	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS gem. EN 14476.....	3 Min.
Ergänzende Prüfergebnisse:	
Wirksam gegen Noroviren (MNV) gem. EN 14476.....	1 Min.
Wirksam gegen Adenoviren gem. EN 14476.....	3 Min.
Wirksam gegen Rotaviren gem. EN 14476.....	30 Sek.

Verfügbare Gebindegrößen	Blattgröße	REF	Stück / Karton	Stück / Palette	ACHTUNG
ventisept wipes RTU pur 70 Blatt	25x25 cm	323070P	3 Rollen	288 Rollen	
ventisept wipes RTU pur 90 Blatt	30x32 cm	323090P	3 Rollen	150 Rollen	

Zulassung und Listungen:

Aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste des VAH.
Gelistet in der IHO-Viruzidie-Liste (www.iho-viruzidie-liste.de).
Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA unter der Reg.-Nr. N-78269
Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.
UFI: 6EX8-GOVR-K006-3KR7



Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Stand der Information: 2022-08

Hersteller:

Heck Hygiene GmbH · Ostring 1 · 34277 Fuldabrück · GERMANY · Telefon +49 561 220739-00 · www.heck-hygiene.de