

HEINE CHANGE System Module: Smartphone Adapter


Für die Verwendung mit dem HEINE BETA  Otoskop

SO GEHT'S GANZ EINFACH!




Mit dem  CHANGE System Smartphone Adapter können Sie jedes Smartphone verwenden. Optimiert ist er für Apple iPhone* in Verbindung mit der Auris App.

 Mit dem Adapter werden zwei Fixierbuttons in unterschiedlicher Höhe geliefert. Bitte prüfen Sie, welcher für Ihr Smartphone geeignet ist.

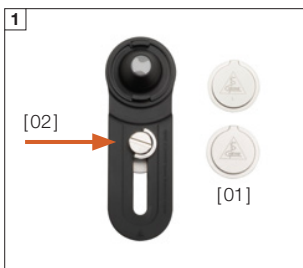

 Halten Sie den Fixierbutton [01] vor dem Anbringen auf der Handyschale von dem Magneten getrennt!

Sollten beide dennoch aneinander haften, trennen Sie die Schraube [02] vom Adapter-Arm. Drehen Sie die Schraube direkt in das Gewinde des Magnethalters und schieben Sie die beiden Elemente auseinander.

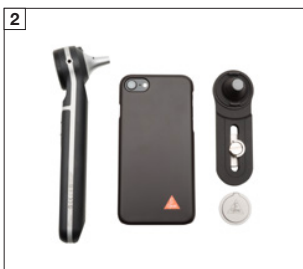

Sie benötigen das BETA  Otoskop und den Smartphone Adapter, bestehend aus Fixierbuttons + Adapter, sowie Ihr Smartphone und eine dazu passende Handyschale**.

Die Handyschale sollte eine harte Rückseite aus Polycarbonat oder Acrylglas haben.



Jetzt die Schutzfolie abziehen und den Fixierbutton rechts unterhalb der ausgewählten Kameralinse fest auf der Handyschale aufdrücken.



Als nächstes bringen Sie den Adapter auf dem Fixierbutton an.



Lösen Sie die Schraube leicht.

Hat Ihr Smartphone nur eine Kamera, fixieren Sie den Adapter mittig vor dieser Kamera.

Hat Ihr Smartphone mehrere Kameras, sollten Sie zunächst testen, welche der Kameras die Hauptkamera ist: Legen Sie den Adapter-Arm so auf die Rückseite des Smartphones, dass eine der Kameralinsen im Zentrum liegt.

Schraube nur leicht festziehen, sodass eine Feinjustierung später noch möglich ist.



Das  CHANGE System Magnifier Modul mit einer Drehbewegung lösen und aus dem Otoskop entfernen.



Anstelle des Magnifier Moduls setzen Sie den Smartphone Adapter plan auf und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn fest. Überprüfen Sie, ob der Adapter mit der gesamten Fläche aufliegt und vollständig eingerastet ist.



Zur Feinabstimmung die Smartphonekamera mit dem Otoskop so justieren, dass auf dem eingeschalteten Display ein klares Bild erkennbar ist. Die Schraube am Adapter festdrehen.

Jetzt können Sie mit der Kamerafunktion Ihres Smartphones wie gewohnt Fotos machen.

* Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

** Das Smartphone und die Handyschale sind nicht im Lieferumfang enthalten.