

# ProCare

**Med 13 PRE**

## Gebrauchsanweisung



## Mildalkalischer, enzymatischer Vorbehandlungsschaum

### Verwendung

ProCare Med 13 PRE ist ein gebrauchsfertiger, mildalkalischer, enzymatischer Reinigungsschaum auf Basis einer speziellen Zusammensetzung aus Enzymen und Tensiden. Das Produkt hält wiederverwendbare invasive und nicht-invasive sowie thermostabile und thermolabile Medizinprodukte, die mit Blut und Geweberückständen verunreinigt sind, feucht und schützt sie dabei vor Korrosion, während sie von ihrem Einsatzort zum Ort der Aufbereitung gebracht werden. Medizinprodukte, die mit diesem Produkt behandelt werden können, sind z. B. chirurgische Instrumente und Utensilien, Instrumente der minimal invasiven Chirurgie oder starre Endoskope.

### Produkteigenschaften

Basierend auf einer speziellen enzymatischen Formulierung sorgt ProCare Med 13 PRE dafür, dass Instrumente feucht bleiben. Zusätzlich bietet das Produkt folgende Eigenschaften:

- Minimiert das Anhaften organischer Verschmutzungen, die durch Operationen entstehen, und erleichtert somit die Reinigung im Reinigungs- und Desinfektionsgerät
- Schützt vor Korrosion
- Leicht abspülbar bereits bei Umgebungstemperatur
- Stabiler Schaum
- Geeignet für Aluminium und eloxiertes Aluminium
- Sicher und nachhaltig für Anwender und Patient

### Materialverträglichkeit

Geeignet für Edelstahl, (eloxiertes) Aluminium, Titan und andere Nichteisenmetalle, verchromte Materialien, Kunststoffe, Elastomere einschließlich Polyurethan und Silikon, Polytetrafluorethylen (PTFE, z. B. Teflon), Gummi, Latex, Glas und Keramik. Keine Materialunverträglichkeit bekannt.

Für Materialien, die oben nicht erwähnt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort, um in Erfahrung zu bringen, ob das Produkt für das Material geeignet ist.

### Dosierung und Anwendung

ProCare Med 13 PRE ist ein gebrauchsfertiges Schaumspray, das sofort nach dem Einsatz eines Medizinprodukts direkt auf die verschmutzten Produktstellen angewendet wird. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, sollte der Schaum so aufgesprüht werden, dass er die Instrumentenfläche vollständig bedeckt und befeuchtet.

Ein Abspülen des Schaums vor der weiteren Aufbereitung oder ein gründliches Vorspülen im Reinigungs- und Desinfektionsgerät trägt zur Stabilität des maschinellen Aufbereitungsprozesses bei.

### Bitte beachten!

Nicht mit anderen Produkten mischen. • Vor einem Produktwechsel wenden Sie sich bitte an Miele/Steelco. • Beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukte-Herstellers entsprechend den Anforderungen der ISO 17664.

# ProCare

**Med 13 PRE**

## Mildalkalischer, enzymatischer Vorbehandlungsschaum

### Technische Daten

Dichte (gebrauchsfertige Lösung): 1.0 g/mL  
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ca. 8.4  
Aussehen (gebrauchsfertige Lösung): klar, farblos

### Inhaltsstoffe

Tenside, Enzyme, Lösungsvermittler, Konservierungsstoffe

### Lagerung und Transport

Das Produkt ist bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C zu transportieren und zu lagern. Dieses Medizinprodukt ist kälteempfindlich. Wenn die Umgebungstemperatur beim Transport voraussichtlich unter 5 °C liegt, muss das Produkt in einem temperaturgeregelten LKW/Seefrachtcontainer bei einer Temperatur von mehr als 5° C transportiert werden. Oder verwenden Sie Schutzabdeckungen bei Transporten, die länger als 10 Stunden dauern und bei denen die Umgebungstemperatur nicht unter minus 5 °C fällt.

### Entsorgung und Recycling

Behälter, Verschlüsse und Etiketten bestehen aus recycelbarem Polyethylen. Für die Entsorgung gebrauchter Behälter, einschliesslich solcher mit Produktrückständen und aufbereiteter Lösung, müssen die lokalen Abfall- und Abwasservorschriften beachtet werden. Für die Entsorgung des ungebrauchten Produkts beachten Sie bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

### Sicherheitshinweise

Informationen zur Arbeitssicherheit finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

### CE-Kennzeichnung

ProCare Med 13 PRE erfüllt die Anforderungen für Medizinprodukte gemäss Medizinprodukte-Verordnung (EU) 2017/745.

### Verfügbarkeit

Bei Fragen zu aktuellen Behältergrössen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler vor Ort.

### Kontaktdaten

#### Deutschland

Miele & Cie. KG  
Vertriebsgesellschaft Deutschland  
Geschäftsbereich Professional  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel. +49 800 22 44 644  
Fax +49 800 33 55 533  
vertrieb@miele-professional.de  
service@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Schweiz

Miele AG  
Limmatstr. 4  
8957 SPREITENBACH  
Tel. +41 56 417 27 51  
Fax +41 56 417 24 69  
www.miele.ch/de/professional  
www.miele.ch/fr/professional

#### Italien

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

#### Luxemburg

Miele s.à.r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339 LUXEMBOURG  
Tel. +352 49711-25  
Fax +352 49711-39  
infolux@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional  
www.miele.lu/fr/professional

### Hersteller

#### Schweiz

Borer Chemie AG  
Gewerbestrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch