



NADAL® Chlamydia Test

Schnelltest zum Nachweis von *Chlamydia trachomatis*

KS Medizintechnik
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921
HIER GÜNSTIG KAUFEN 
www.ksmedizintechnik.de

Chlamydia trachomatis

Chlamydia trachomatis-Infektionen gehören zu den häufigsten sexuell übertragbaren bakteriellen Krankheiten. Eine Chlamydien-Infektion wird oft nur als Nebenbefund diagnostiziert, da die Übertragungsrate hoch ist und die Infektion in den meisten Fällen asymptomatisch verläuft. Neben der sexuellen Übertragung kann die Infektion auch bei der Geburt vertikal von der Mutter auf das Neugeborene übertragen werden.

Wird eine Infektion über einen längeren Zeitraum nicht erkannt, kann es bei Frauen zu schweren Komplikationen wie Zervizitis, Urethritis und Endometritis führen. Infolge von Unterleibsentzündungen kann es durch Vernarbungen letztendlich sogar zur Unfruchtbarkeit kommen. Bei Neugeborenen hat die Infektion unter anderem Lungenentzündungen oder Einschlusskörperchenkonjunktivitis zur Folge. Bei Männern sind die häufigsten Folgen Epididymitis und Urethritis.

Je nach Altersgruppe sind etwa 10 Prozent der Bevölkerung infiziert, wobei die Situation bei Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren am gravierendsten ist. Vor allem junge Mädchen machen einen großen Teil der jährlichen Neuinfektionen aus. Um den schwerwiegenden Komplikationen vorzubeugen ist eine frühzeitige Erkennung einer bereits bestehenden Infektion sinnvoll.

www.nal-vonminden.com

NADAL® Chlamydia Test

Der **NADAL® Chlamydia Test** ist ein schneller und qualitativer Immunoassay zum Nachweis von *Chlamydia trachomatis* in Zervixabstrichen bei Frauen, sowie Harnröhrenabstrichen und Urinproben bei Männern.


Durch eine kurze Testdauer von nur 10 Minuten und eine einfache und eindeutige visuelle Testauswertung ist der **NADAL® Chlamydia Test** ein ideales Hilfsmittel bei der Diagnose einer Chlamydien-Infektion.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Hohe Sensitivität und Spezifität
- ✓ Durchführbar mit Zervixabstrichen (Frauen), Harnröhrenabstrichen und Urinproben (Männer)
- ✓ Kosteneffizientes Diagnose-Hilfsmittel
- ✓ Schnelle und verlässliche Testergebnisse in nur 10 Minuten
- ✓ Testlagerung gekühlt oder bei Raumtemperatur (2 - 30°C)
- ✓ Mindestens 12 Monate haltbar

Testdurchführung


1

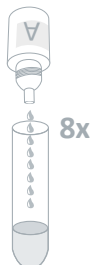


2




3

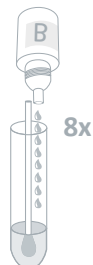

4

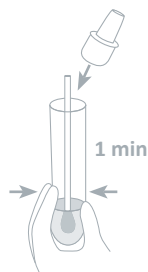

5

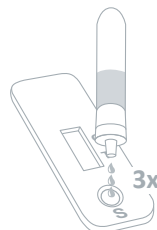

6



Geben Sie **8 Tropfen Puffer A** in das Extraktionsröhrchen. Geben Sie den Abstrichtupfer des Patienten hinein und **warten Sie 2 Minuten**. Drehen Sie den Tupfer in der Zwischenzeit kreisförmig und drücken ihn gegen die Röhrchenwand (mind. 15 x).

Geben Sie **8 Tropfen Puffer B** hinzu und mischen Sie die Flüssigkeiten mit Hilfe des Tupfers. Drücken Sie den Tupfer anschließend **1 Minute** an der Röhrchenwand aus. Setzen Sie den Tropfaufsatz auf das Extraktionsröhrchen.

Geben Sie **3 Tropfen (ca. 100 µl)** der extrahierten Probe in die Probenvertiefung der Testkassette. Vermeiden Sie die Bildung von Luftblasen und geben Sie keine Lösung in das Reaktionsfeld.

Ergebnisse sollten **nach 10 Minuten abgelesen** werden. Ergebnisse nach 20 Minuten sollten nicht mehr abgelesen und als ungültig eingeordnet werden.

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Testauswertung

Positiv



Negativ



Ungültig



NADAL® Chlamydia Test

Schnelltest zum Nachweis von *Chlamydia trachomatis*

Produkt	Probenmaterial	Sensitivität	Spezifität	Abrechnung	Bestell-Nr.	Packungsgröße
NADAL® Chlamydia Test	Zervixabstrich (Frauen), Harnröhrenabstriche und Urinproben (Männer)	90,2 % (Zervixabstrich)	96,0 % (Zervixabstrich)	GOÄ A4504 1,15; 8,71 €	212007	20 Stück

Im Lieferumfang enthalten sind: Testkassetten • Zervixabstrichtupfer • Extraktionsröhrchen • Extraktionspuffer • Röhrchenhalter • Bedienungsanleitung

Gerne beantwortet unser **Vertriebsteam** alle Ihre Fragen unter
Tel.: +49 941 29010-0 oder +49 2841 99 820-0 und per E-Mail vertrieb@nal-vonminden.de

We help you care!

