

Dosiertabelle gigasept® pearls

schülke →

Dosierbecher: 100 g Granulat $\triangleq$ 150 ml

1 gehäufte Dosierlöffel $\triangleq$ 40 g Granulat $\triangleq$ 60 ml

Liter Lösung	Konzentration der Gebrauchslösung	
	1 %	2 %
1 Liter	15 ml ($\triangleq$ 10 g)	30 ml ($\triangleq$ 20 g)
2 Liter	30 ml ($\triangleq$ 20 g)	60 ml ($\triangleq$ 40 g)
4 Liter	60 ml ($\triangleq$ 40 g)	120 ml ($\triangleq$ 80 g)
8 Liter	120 ml ($\triangleq$ 80 g)	240 ml ($\triangleq$ 160 g)
10 Liter	150 ml ($\triangleq$ 100 g)	300 ml ($\triangleq$ 200 g)
20 Liter	300 ml ($\triangleq$ 200 g)	600 ml ($\triangleq$ 400 g)
30 Liter	450 ml ($\triangleq$ 300 g)	900 ml ($\triangleq$ 600 g)

Anwendungshinweise:

Wasser vorlegen. Dem Wasservolumen entsprechende Granulatmenge mit Dosierbecher/-löffel einstreuen. Während der ersten 15 Minuten mehrfach umrühren, im Anschluss an diese Aktivierungszeit ist die Gebrauchslösung einsatzbereit. Gemäß RKI Empfehlung Gebrauchslösung arbeitstäglich und bei deutlich sichtbarer Kontamination erneuern.

KS Medizintechnik
seit 1921

Karthäuser Straße 21
34587 Felsberg
Kostenlose Servicehotline
Tel.: 0800 - 10 10 871

www.ksmedizintechnik.de
info@ksmedizintechnik.de

Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->