

schülke -†



Sporizide Tücher auf Basis von Peressigsäure zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen.

mikrocid® PAA wipes

Unser Plus

- sporizide Wirksamkeit
- sofort einsetzbar - keine Aktivierung notwendig

Anwendungsgebiete

Das Produkt ist geeignet zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen. Das Produkt bietet mit der einmaligen oxidierenden Kraft der Peressigsäure eine sporizide Wirksamkeit für den Ausbruchsfall. Aufgrund ihres großen Wirkspektrums und der kurzen Einwirkzeit sind die mikrocid® PAA wipes die idealen Desinfektionstücher für den Einsatz in Bereichen, in denen ein besonders großes Risiko der Übertragung von pathogenen Keimen besteht. Beispiele sind u. a. Isolierzimmer, OP-Bereiche, Intensivstationen, die unreine Seite in der ZSVA/ Endoskopie oder auch die Neonatologie. Patientennahe Flächen und Flächen mit häufigem Hand- oder Hautkontakt stehen im Fokus der Anwendung. Die Tücher eignen sich für die Desinfektion von semikritisch A und kritisch A Medizinprodukten, sofern die Aufbereitungsempfehlung des jeweiligen Medizinprodukteherstellers die Desinfektion im Wischverfahren erlaubt.

Nach der Desinfektion von semikritisch A und kritisch A Medizinprodukten ist ein Nachwischen erforderlich. Nicht zur Aufbereitung von semikritisch B und kritisch B Medizinprodukten geeignet.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN13727, EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
tuberkulozid EN14348 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
levurozid EN13624, EN16615 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
fungizid EN13624 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
begrenzt viruzid PLUS EN14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
viruzid EN14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.
Clostridium difficile EN17126 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
Clostridium difficile EN17126 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.

Listungen

- VAH-Zertifikat



KS **Medizintechnik** seit 1921

Telefon: 0800 - 10 10 871

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

Produkt Daten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe:
0,06 % Peressigsäure, weitere Inhaltsstoffe:
Wasserstoffperoxid, Essigsäure

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	1,03 g/cm ³ / 20 °C / der Wirkstofflösung
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 104 °C / Methode: ISO 3679 / GLP: ja / der Wirkstofflösung
Form	Wässrige Lösung auf Vliesstoff
pH	Nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch	1 mPa*s / 20 °C / der Wirkstofflösung

Besondere Hinweise

BAuA Reg.-Nr.: N-50007 (PT2), N-50008 (PT4)

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Nitrilkautschuk) ist unbedingt notwendig. Nicht auf Buntmetallen verwenden und nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. schülke garantiert nach Anbruch der Verpackung und bei Einhaltung der Anweisungen eine Haltbarkeit von 28 Tagen.

Anwendungshinweise

Die Fläche mit dem Tuch gründlich wischen und die Wirkstofflösung einwirken lassen.

Auf vollständige Benetzung achten. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberflächen ab. Beim Öffnen und Einfädeln des ersten Tuchs auf hygienische Aspekte achten. Nach Gebrauch auf das Schließen des Deckels achten. Zur Anwendung auf größeren Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden. Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrozid PAA wipes -INT- 50 ST DS	10/Karton	70003205 PZN: 17848094

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Wandhalterung Jumbodose	134421

Verwandte Produkte

- mikrozid[®] AF wipes
- mikrozid[®] sensitive wipes
- mikrozid[®] universal wipes green line
- mikrozid[®] universal wipes premium
- Wandhalterung Jumbodose

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com