



CE 0483

SEEMANN
TECHNOLOGIES

Index: H

letzte Änderung:
30.05.2022

Technische Änderungen vorbehalten

DEUTSCH - Kontakt: Seemann Technologies GmbH > Panoramastrasse 20 > 78583 Böttingen



info@seemann-technologies.com > www.seemann-technologies.com > T. 07429/9300388

1 Geltungsbereich

Sterile bipolar Pinzetten zur Einmalverwendung Artikel-Nr.
siehe unten.

Maximale Zubehörbemessungsspannung:

Bezeichnung	Artikel-Nr.	U _{max}
Einmal bipolar Pinzetten	ST-99-300 bis ST-99-399 ST-99-300SL – ST-99-399SL – ST-99-300CAB – ST-99-399CAB – ST-99-300CAB- SL – ST-99- 399CAB-SL – ST-99-300ERB – ST-99-399ERB – ST-99-300ERB- SL – ST-99- 399ERB-SL – ST-99-300MAR – ST-99-399MAR – ST-99-300MAR- SL – ST-99- 399MAR-SL	0,5 kVp

In Abhängigkeit des jeweils verwendeten HF-Generators.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Bei der Kombination mit anderem HF-Zubehör entspricht
die maximale Zubehörbemessungsspannung der kleinsten
Zubehörbemessungsspannung.
Grundsätzlich sollte die niedrigste effektive Leistungsein-
stellung für ein bestimmtes Verfahren verwendet werden.

2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die bipolaren Pinzetten dürfen nur von ausgebildetem,
medizinischem und auf dieses Produkt geschultem Perso-
nal verwendet werden.

Die bipolaren Pinzetten sind für die offene Chirurgie vor-
gesehen und dienen dem Manipulieren und Koagulieren
von biologischem Gewebe. Sie sind nicht für den direkten
Kontakt mit dem Herzen oder dem zentralen Kreislauf-
oder zentralen Nervensystem vorgesehen. Die bipolaren
Pinzetten werden über ein passendes HF-Kabel mit dem
bipolaren Ausgang des elektrochirurgischen Generators
verbunden. Die Aktivierung erfolgt mittels eines Fußschal-
ters. Es wird empfohlen eine Rauchgasabsaugung zu ver-
wenden.

3 Sicherheitshinweis



WARNUNG !

Die maximale Bemessungsspannung der bipolaren Pin-
zetten ist dieser Gebrauchsanweisung, dem Etikett oder
dem aktuellen Produktkatalog zu entnehmen.

Bei Unklarheiten ist der Hersteller zu kontaktieren.

Vor jedem Gebrauch muss eine Sicht- und Funktionsprü-
fung durchgeführt werden (siehe Punkt 5 „Sicht- und Funk-
tionsprüfung“). Es ist sicherzustellen, dass die bipolare
Pinzette fest im passenden HF-Kabel eingesetzt ist. Dabei
muss vorsichtig vorgegangen werden, um Beschädigun-
gen der bipolaren Pinzette und/oder Verletzungen des Pa-
tienten oder des chirurgischen Personals zu vermeiden.
Spitzen können durch übermäßigen Kraftaufwand beschä-
digt werden. Solange die bipolare Pinzette in Kontakt mit
metallischen Gegenständen und/oder Optiken steht, darf
keine Aktivierung erfolgen, da es sonst zu Verbrennungen
kommen kann.

Eine beschädigte Isolation kann zu einem Durchschlag
führen. Bei Durchschlägen kann es zu ernsthaften Ver-
brennungen des Anwenders oder des Patienten kommen.
Die Pinzetten nur aktivieren, wenn sich die Kontaktflächen
im Sichtbereich befinden und dabei keine anderen metalli-
schen Instrumente und Gegenstände berühren.



**Es ist darauf zu achten, dass sich während der kom-
pletten Anwendung keine brennbaren Stoffe und/oder
feuchte Tücher in unmittelbarer Umgebung befinden,
da sonst Explosionsgefahr oder die Gefahr eines
Spannungsüberschlags besteht.**

Nachdem Abschalten des elektrochirurgischen Stroms,
kann die Instrumentenspitze immer noch heiß sein, sodass
sie Verbrennungen verursachen kann.

Die Anwendung von HF-Strom kann zur Schädigung von
Herzschrittmachern und In-Vivo-Herzdefibrillatoren füh-
ren, deshalb müssen betroffene Patienten vor dem Eingriff
einen Kardiologen konsultieren.

Die Verwendung dieser Pinzetten in Kombination mit Ra-
dio-Frequenz Geräten ist nicht erlaubt.

4 Wiederaufbereitung

NICHT ERLAUBT – STERILES EINMALPRODUKT



5 Sicht- und Funktionsprüfung



Vor jedem Gebrauch ist eine Sicht- und Funktionsprüfung
durchzuführen. Die Isolation der bipolaren Pinzetten ist auf
Druckstellen oder Beschädigungen zu prüfen. Vor der An-
wendung ist die bipolare Pinzette und sein Zubehör auf
Beschädigungen, fehlende oder lose Teile, scharfe Kanten
sowie raue Oberflächen zu überprüfen. Bipolare Pinzetten
mit Beschädigung, fehlenden oder losen Teilen, mit Druck-
stellen oder Beschädigungen an der Isolation, dürfen nicht
eingesetzt werden.

6 Reparatur und Modifikation

Defekte bipolare Pinzetten dürfen nicht repariert werden.
Sie sind durch neue bipolare Pinzetten zu ersetzen. Eigen-
mächtige Modifikationen und Reparaturarbeiten sind
strengstens untersagt und führen zum Verlust der Herstel-
lergewährleistung.

7 Verpackung, Lagerung, Transport, Hand- habung

Die bipolaren Pinzetten müssen beim Transportieren und
Lagern stets mit größter Sorgfalt behandelt werden. Dies
gilt insbesondere für feine Spitzen und sonstige empfindli-
che Bereiche.

Bei der Verpackung ist darauf zu achten, dass diese nicht
beschädigt wird.

Produkte aus beschädigten Verpackungen sind nicht mehr
steril und dürfen daher nicht mehr verwendet werden!

Transportbedingungen:

Umgebungstemperatur:



Relative Luftfeuchtigkeit:



Lagerbedingungen:

Der angegebene Verwendungszeitraum für die sterilen
HF-Elektroden ist nur bei sach- und fachgerechter Lage-
rung gültig.

Lagerbedingungen für Sterilgut:

- Trocken
- staubgeschützt/staubarm
- lichtgeschützt
- geschützt vor Beschädigung
- geschützt vor mechanischen Einflüssen
- geschützt vor extremen Temperaturschwankungen
- getrennt von unsterilen Produkten
- sauber
- frei von Ungeziefer

8 Haltbarkeit

3 Jahre ab dem Herstellungsdatum

9 Entsorgung

Die Entsorgung der bipolaren Pinzetten und des Verpa-
ckungsmaterials sowie des Zubehörs hat nach den jeweils
geltenden länderspezifischen Vorschriften und Gesetzen
zu erfolgen.



DEUTSCH - Kontakt: Seemann Technologies GmbH > Panoramastrasse 20 > 78583 Böttingen



info@seemann-technologies.com > www.seemann-technologies.com > T. 07429/9300388

10 Rücksendung

Sterile Einmalprodukte sind von einer Rücknahme bzw. vom Umtausch ausgeschlossen.

11 Über diese Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss für den Zeitraum der Nutzung der bipolaren Pinzetten für jeden Nutzer frei zugänglich aufbewahrt werden.

Für Schäden oder Folgeschäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, übernimmt die Seemann Technologies GmbH keinerlei Haftung oder Gewährleistung.

Die Gebrauchsanweisung kann jederzeit auf der Webseite www.seemann-technologies.com unter dem Bereich „login“ herunter geladen werden.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen direkt an die Telefon-Nr. +49 (0)7429 9300388 oder info@seemann-technologies.com.



Achtung




Gebrauchsanweisung beachten



Trocken aufbewahren



Vor Sonnenlicht schützen

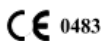

CE-Kennzeichnung mit Nummer der benannten Stelle nach der Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte



Medizinprodukt

12 Verwendete Symbole:



Hersteller



Bestellnummer



Chargenbezeichnung



Herstelldatum



Verwendbar bis



Nicht zur Wiederverwendung



Nicht wiedersterilisieren



Sterilisiert mit Ethylenoxid



Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Latexfreies Produkt



Temperaturbereich bei Lagerung



Feuchtigkeitslimitierung bei Lagerung

©2019 Seemann Technologies GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Firmennamen, Markenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Produktnamen und Logos in diesem Dokument sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer und müssen entsprechend behandelt werden.