



+ Superabsorber mit Silikon-Wundkontaktschicht

zur Behandlung von sehr stark
exsudierenden Wunden

DURAMAX[◇] S

Smith+Nephew



Medizintechnik

Telefon: 0800 - 10 10 871

seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de



DURAMAX[◇] S 6-lagiges Design mit Silikon-Wundkontaktschicht

Polypropylen- und
Polyethylenfolie
wasserdampfdurchlässig

Vliesstoffschichten
aus Polypropylen

großporige Silikon-
Wundkontaktschicht

- Atraumatisches Entfernen
- Repositionierbar
- Angenehmer Tragekomfort

superabsorbierender Polymerkern
absorbiert und schließt das
Exsudat ein – auch unter
Kompression



Optimales Exsudatmanagement



Sehr hohe Absorptions- und Rückhaltekapazität verhindert Mazeration und Reizung des Wundbetts und der Wundumgebung.

Aufnahmekapazität: 1,61 g/cm² ohne Druck; 1,03 g/cm² unter Druck

Rückhaltekapazität: 1,24 g/cm²

DURAMAX S PID-6483-2



DURAMAX S absorbiert und schließt das Exsudat ein – auch unter Kompression

Optimaler Schutz



DURAMAX° S ist ein nicht-okklusiver, atmungsaktiver Wundverband der die Wunde optimal feucht hält.



Schutz der Wundumgebung

Zwei Schichten umschließen den absorbierenden Kern, verstärken den Verband und halten die Polymere an Ort und Stelle.



Hoher Tragekomfort durch Flexibilität

Atraumatischer Verbandwechsel: die vernetzte Silikon-Wundkontaktschicht verklebt nicht mit dem Wundbett.

Minimiert Leckagen & Mazeration: kann helfen, die Wundumgebung und den Wundrand vor Wundexsudat und Feuchtigkeit zu schützen.



Anwendungsgebiete bei sehr stark exsudierenden Wunden wie zum Beispiel:

- Arterielle Ulzera
- Venöse Ulzera
- Diabetischer Fußulkus
- Verbrennungen (2. Grades)
- Postoperative Wunden
- Traumatische Wunden

DURAMAX[°] S

Anwendung in 5 einfachen Schritten



1



2



3

Kombinieren Sie **DURAMAX[°] S** mit einem geeigneten Sekundärverband oder einer Fixierfolie.



4



5

Wenn die Exsudatmenge rückläufig ist, empfehlen wir **ALLEVYN[®] LIFE** für stark bis mäßig exsudierende Wunden.



DURAMAX[°] S zur Behandlung sehr stark exsudierender Wunden bei denen ein täglicher Verbandwechsel notwendig ist. **DURAMAX[°] S** kann bis zu 7 Tage auf der Wunde bleiben. Kann auch unter Kompression angewendet werden.

Bestellinformationen DURAMAX[°] S

Mit der PZN direkt zum richtigen Produkt

PZN	Artikelnummer	Größe in cm	Wundpadgröße in cm	Inhalt pro Versandeinheit	Inhalt/OP*
17944461	66803131	10,0 x 10,0	7,0 x 7,0	400 Stück (40 OP)	10 Stück
17944478	66803132	15,0 x 20,0	12,0 x 17,0	200 Stück (20 OP)	10 Stück
17944484	66803133	20,0 x 20,0	17,0 x 17,0	200 Stück (20 OP)	10 Stück
17944490	66803134	20,0 x 25,0	17,0 x 22,0	160 Stück (16 OP)	10 Stück
17944509	66803135	20,0 x 40,0	17,0 x 37,0	100 Stück (10 OP)	10 Stück

* Originalverpackung, Erstattungsfähig

Wundmanagement Deutschland

Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 30
D-22763 Hamburg

T +49 (0) 40 8797 44-350
F +49 (0) 40 8797 44-375
www.smith-nephew.de
info@smith-nephew.com

Hersteller: Winner Medical Co., Ltd., Winner Industrial Park, No.660 Bulong Road, Longhua District, 518109 Shenzhen, China; EC Rep: Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestraße 80, 20537 Hamburg

Keine verzögerte Wundheilung –
wir möchten Sie dabei unterstützen, diesem Ziel nach Möglichkeit jeden Tag etwas näher zu kommen.
www.closetozero.de